



ПРОДУКЦИЯ B. BRAUN
ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
САМОКАТЕТЕРИЗАЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

ОСТАВАТЬСЯ АКТИВНЫМ, ЖИТЬ
ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ!

СОДЕРЖАНИЕ

4 ВВЕДЕНИЕ

5 ЛИНЕЙКА КАТЕТЕРОВ АКТРИН ЛАЙТ И НАБОРЫ АКТРИН ГЛИС СЕТ

- 6 Катетеры Актрин Лайт
- 8 Наборы Актрин Глис Сет

10 АСЕПТИЧЕСКАЯ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОФИЛЬНЫХ И ЛУБРИЦИРОВАННЫХ КАТЕТЕРОВ АКТРИН ЛАЙТ И АКТРИН ГЛИС СЕТ

- 11 Как правильно выполнить асептическую самокатетеризацию?
Рекомендации для мужчин
- 15 Как правильно выполнить асептическую самокатетеризацию?
Рекомендации для женщин

18 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- 19 Как пользоваться катетером, если нет возможности слить мочу в унитаз или судно?
- 19 Если мешок наполнится, будет ли моча вытекать из мешка?
- 19 Как контролировать объем выделенной мочи?
- 19 Существуют ли специальные требования к хранению катетеров «Актрин Лайт» и наборов «Актрин Глис Сет»?
- 20 Какой лубрикант используется в катетерах Актрин?
- 20 Какой антисептик лучше использовать для обработки рук перед катетеризацией?
- 20 Какой антисептик лучше использовать для обработки половых органов перед катетеризацией?
- 20 Что нужно сделать, чтобы бесплатно получать лубрицированные катетеры?
- 20 Алгоритм действий
- 21 Как определить необходимый мне размер катетера?

22 В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ

- 23 Мужской наружный катетер Уримед Вижн
- 25 Мешок для сбора мочи Уримед Бэг
- 26 Дневные и ночные мочеприемники Уримед
- 27 Аксессуары для мочеприемников Уримед



ВВЕДЕНИЕ

Компания Б. Браун занимается разработкой и производством медицинских изделий более 180 лет. Выпускаемая продукция пользуется популярностью во всех странах мира. Постоянное развитие и совершенствование новых технологий — отличительная особенность компании Б. Браун. Комбинируя надежные, проверенные временем технологии с инновациями, мы создаем по-настоящему удобную продукцию. Определяющими факторами для нас являются качество и безопасность. Мы предъявляем самые строгие требования к надежности нашей продукции. Перед выпуском на рынок вся продукция подвергается тщательному тестированию. Так мы поддерживаем неизменно высокий уровень ее качества.

В этой брошюре мы постарались предоставить больше информации, касающейся практического использования продукции при нарушении функции выделения.

ЛИНЕЙКА КАТЕТЕРОВ АКТРИН ЛАЙТ И НАБОРЫ АКТРИН ГЛИС СЕТ

КАТЕТЕРЫ АКТРИН ЛАЙТ

Готовые к использованию лубрицированные катетеры для самокатетеризации Актрин Лайт назначаются пациентам с симптомами нейрогенного мочевого пузыря во всем мире на протяжении двух десятков лет. Компания Б.Браун постоянно совершенствует свою продукцию, делая ее безопаснее и удобнее для использования.

Современное требование к безопасности катетеризации — асептичность процедуры, т.е. вводимый катетер должен быть стерилен и ни в коем случае не касаться рук и окружающих предметов во время извлечения его из упаковки и катетеризации. Несоблюдение этих правил может привести к инфицированию мочевых путей.

РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ


- Возможность полного или частичного извлечения катетера из упаковки (A, B, C)

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ УПАКОВКИ

- предназначена для простого вскрытия (1, 2)



Поэтому в технологии Актрин была использована специальная упаковка, разработанная инженерами компании совместно с пациентами: она позволяет проводить катетеризацию, не касаясь катетера руками (система No Touch), в то же время, ее могут с легкостью открыть даже люди с нарушенной моторикой рук. В катетерах Актрин используется гидрофильный лубрикант на основе глицерина и воды. Особое соотношение ингредиентов создает лучший скользящий эффект, снижая трение и исключая «залипание» катетера, как это часто случается с другими типами лубрикантов. Поэтому катетер Актрин не травмирует уретру.

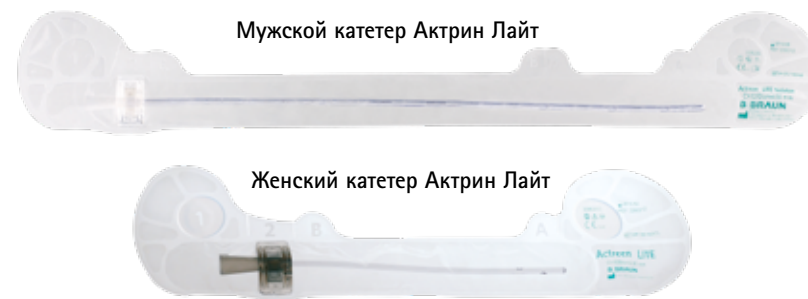



Катетеры лучше хранить в горизонтальном положении для равномерного распределения лубриканта на катетере.

Катетеры имеют различный размерный ряд для мужчин, женщин и детей. Мужские катетеры имеют длину 45 см, а женские — 20 см. Длина зависит от анатомических особенностей уретры, связанных с полом и возрастом.

Наружный диаметр катетера измеряется в Шарьерах (в честь французского инженера Шарьера). Эта единица измерения является международной и имеет обозначение «СН». Подобрать катетер необходимого диаметра Вам поможет Ваш лечащий врач.



Катетеры имеют универсальный коннектор с удобной цветовой кодировкой размеров, адаптированный для всех типов мочеприемников.

Катетер	Информация для заказа						
 Тиманн мужской 45 см	Размер	CH08	CH10	CH12	CH14	CH16	CH18
	Артикул	228108RU	228110RU	228112RU	228114RU	228116RU	228118RU
 Нелатон мужской 45 см	Размер	CH08	CH10	CH12	CH14	CH16	CH18
	Артикул	228208RU	228210RU	228212RU	228214RU	228216RU	228218RU
Нелатон женский 20 см	Размер	CH06	CH08	CH10	CH12	CH14	CH16
	Артикул	228306RU	228308RU	228310RU	228312RU	228314RU	228316RU


НАБОРЫ АКТРИН ГЛИС СЕТ

АКТРИН ГЛИС СЕТ – медицинское изделие, которое максимально подходит для людей, стремящихся вести активный образ жизни. Это стерильный, готовый к использованию набор для индивидуального использования, который состоит из лубрицированного катетера и соединенного с ним мочеприемника.

В наборе используется специальная упаковка, полностью исключающая контакт катетера с руками, что многократно снижает риск инфицирования.


СИСТЕМА «NO TOUCH»

- Отсутствие контакта с руками
- Снижен риск инфицирования

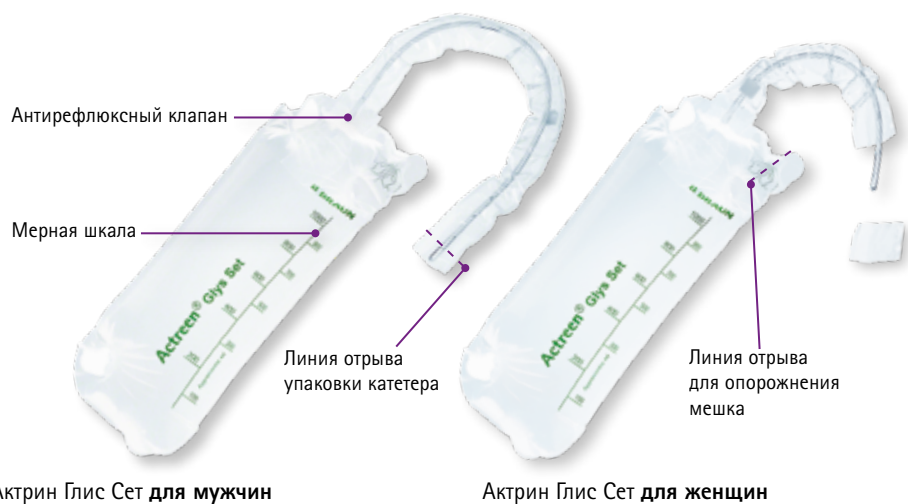

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Стерильный
- Не требует активации водой
- Покрыт гидрофильным лубрикантом на основе оптимального соотношения воды и глицерина
- Отсутствует риск высыхания катетера в процессе катетеризации
- Не вызывает дискомфорта при введении

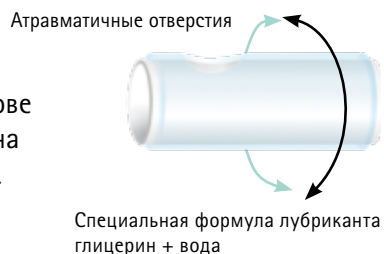



УДОБСТВО ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- Компактный и легкий
- Упаковка легко открывается
- Прозрачный мочеприемник с нанесенной градуировкой: визуальный контроль объема мочи
- Одна линия отрыва для опорожнения мешка

АНТИРЕФЛЮКСНЫЙ КЛАПАН

- Исключает риск обратного затекания мочи



Катетер		Информация для заказа					
	Тиманн мужской 45 см	Размер	CH08	CH10	CH12	CH14	CH16
	Артикул	226108A	226110A	226112A	226114A	226116A	
	Нелатон мужской 45 см	Размер	CH08	CH10	CH12	CH14	CH16
	Артикул	226208A	226210A	226212A	226214A	226216A	226218A
	Нелатон женский 20 см	Размер	CH06	CH08	CH10	CH12	CH14
	Артикул	226306A	226308A	226310A	226312A	226314A	226316A

АСЕПТИЧЕСКАЯ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОФИЛЬНЫХ И ЛУБРИЦИРОВАННЫХ КАТЕТЕРОВ АКТРИН ЛАЙТ И АКТРИН ГЛИС СЕТ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ АСЕПТИЧЕСКУЮ САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЮ?



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МУЖЧИН

ВАЖНО!

Перед использованием про-
консультируйтесь с врачом!



1. ПОДГОТОВЬТЕ РУКИ

Вымойте руки с мылом и обра-
ботайте антисептическим рас-
твором «Софта-Ман изо» или
другим антисептиком, рекомен-
дованным Вашим лечащим вра-
чом.



2. ПОДГОТОВЬТЕ КАТЕТЕР: ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И, ЕСЛИ НУЖНО, ПРИСО- ЕДИНИТЕ МОЧЕПРИЕМНИК

Упаковка катетера Актрин Лайт
вскрывается по линии перфора-
ции рядом с коннектором. Если
у Вас нарушена моторика паль-

цев рук, можно воспользоваться специальным круглым отверстием упаковки, вставив палец в отверстие и слегка потянув в сторону.

В случае, если вы используете мочеприемник «Уримед», соедините его с кате-
тером. Если вы не используете мешок-мочеприемник, будьте готовы направить
конец катетера в унитаз или какую-либо емкость.



3. ПОДГОТОВЬТЕ ПОЛОВОЙ ЧЛЕН

Возьмите две марлевые салфетки и обильно намочите их антисептиком. Отведите крайнюю плоть. Протрите всю головку и венечную борозду одной из салфеток, выбросьте салфетку.

Возьмите другую салфетку и одним движением (в одном направлении, не растирая вперед-назад) протрите область около наружного отверстия уретры. Для обработки можно использовать антисептический раствор Пронтосана.



4. ОТКРОЙТЕ КАТЕТЕР

Возьмите катетер в правую руку (если Вы левша — в левую). Выберите линию открытия упаковки «А» или «В» (см. страницу 6), в зависимости от ваших предпочтений, и откройте катетер.



5. ПРИГОТОВЬТЕСЬ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ

Возьмите половой член левой рукой и поднимите вверх так, чтобы вам было видно отверстие уретры.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОЗЫ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ



6. ВВЕДИТЕ КАТЕТЕР

Держа катетер Актрин Лайт правой рукой за упаковку ближе к его открытой части и не касаясь самого катетера, движением вниз введите катетер в наружное отверстие уретры.



Когда открытая часть катетера (2–10 см) войдет в уретру, вы можете одной рукой удерживать катетер в упаковке и половой член, а другой вводить катетер, собирая упаковку в гармошку. Опустите половой член вниз, продолжая без усилия вводить катетер.



Основное препятствие на пути проведения катетера — наружный сфинктер мочевого пузыря. Помните, что сфинктер подконтролен сознанию, вы сами можете его расслабить. Более легко провести катетер вам поможет глубокий вдох. Вы ощутите, как преодолели сфинктер. Продвигайте катетер дальше, пока из него не потечет моча. Это значит, что катетер в мочевом пузыре.



7. ВЫПУСТИТЕ МОЧУ

Это может занять некоторое время, зависящее от количества мочи и диаметра катетера.



8. ИЗВЛЕКИТЕ КАТЕТЕР

Как только моча перестанет поступать из катетера, начните медленно извлекать катетер, при этом еще может выйти небольшое количество мочи.

Извлеките катетер Актрин Лайт полностью и выбросьте его в контейнер для мусора.



9. ОБРАБОТАЙТЕ РУКИ

После окончания процедуры вымойте руки с мылом

ПРИМЕЧАНИЕ

В специальной упаковке катетера Актрин Лайт предусмотрена возможность полного извлечения катетера по линии перфорации «С», но надо понимать, что использование открытого катетера не будет способствовать проведению асептической катетеризации, поскольку ваши руки будут касаться самого катетера. Как правило, катетер в таком виде использует медперсонал стационаров.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ АСЕПТИЧЕСКУЮ САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЮ?



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ВАЖНО!

Перед использованием проконсультируйтесь с врачом!

1. ПОДГОТОВЬТЕ РУКИ

Вымойте руки с мылом и обработайте антисептическим раствором «Софта-Ман изо» или другим антисептиком, рекомендованным Вашим лечащим врачом.



2. ПРИМИТЕ УДОБНУЮ ДЛЯ ВАС ПОЗУ

Первое время пользуйтесь зеркалом, чтобы находить наружное отверстие уретры. Впоследствии вы сможете ориентироваться на свои ощущения либо продолжать пользоваться зеркалом.



ВОЗМОЖНЫЕ ПОЗЫ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ





3. ПОДГОТОВЬТЕ КАТЕТЕР: ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И, ЕСЛИ НУЖНО, ПРИСО- ЕДИНИТЕ МОЧЕПРИЕМНИК

Упаковка катетера Актрин Лайт вскрывается по линии перфорации рядом с коннектором. Если у Вас нарушена моторика пальцев рук, можно воспользоваться специальным круглым отверстием упаковки,

вставив палец в отверстие и слегка потянув в сторону.


В случае, если вы используете мочеприемник «Уримед», соедините его с катетером. Если вы не используете мешок-мочеприемник, будьте готовы направить конец катетера в унитаз или какую-либо емкость.



4. ОБРАБОТАЙТЕ НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Возьмите две салфетки и намочите их антисептиком. Разведите половые губы. Первой салфеткой протрите кожу в области клитора и малых половых губ в направлении спереди назад однократно, не заходя повторно на чистые участки. Второй салфеткой еще раз также спереди назад одним движением протрите область наружного отверстия уретры.

Вместо салфеток вы можете использовать антисептик «Пронтосан» в виде спрея, распылив его на область малых половых губ, клитора и наружного отверстия уретры.

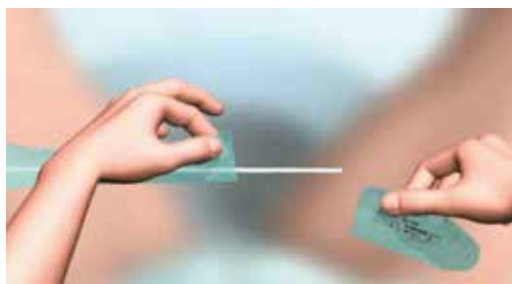

5. ОТКРОЙТЕ КАТЕТЕР

Вскройте упаковку катетера по линии перфорации «А». Если у Вас нарушена моторика пальцев рук, можно воспользоваться специальными круглыми отверстиями упаковки, вставив палец в отверстие и слегка потянув в сторону.

Освободите катетер от упаковки примерно на 2 см, потянув ее в сторону коннектора.



6. ВВЕДИТЕ КАТЕТЕР

Свободной рукой разведите половые губы. Введите открытую часть катетера «Актрин Лайт» в уретру примерно на 1–2 см, удерживая катетер за упаковку, затем, отпустив половые губы, одной рукой продвигайте катетер вперед, удерживая другой рукой упаковку у входного отверстия уретры и собирая ее в гармошку.



Когда катетер «Актрин Лайт» попадет в мочевой пузырь, по катетеру начнет поступать моча. Если катетер попадет во влагалище, необходимо заменить катетер и провести катетеризацию снова.



7. ВЫВЕДИТЕ МОЧУ

Это может занять некоторое время, зависящее от диаметра катетера и объема мочи в пузыре. Как только моча перестанет поступать из катетера, медленно начните извлекать катетер, при этом может выйти еще небольшое количество мочи.



8. УТИЛИЗИРУЙТЕ КАТЕТЕР

Извлеките катетер «Актрин Лайт» полностью и выбросьте его в контейнер для мусора. Вымойте руки с мылом.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТЕТЕРОМ, ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СЛИТЬ МОЧУ В УНИТАЗ ИЛИ СУДНО?

Когда Вы находитесь в путешествии или общественном месте, лучше всего использовать катетер Актрин Глис Сет. Иначе его называют «набор с мочеприемником». В наборе лубрицированный катетер сразу соединен с мешком для сбора мочи. Это очень удобно.

ЕСЛИ МЕШОК НАПОЛНИТСЯ, БУДЕТ ЛИ МОЧА ВЫТЕКАТЬ ИЗ МЕШКА?

Нет, моча не будет вытекать из мешка, поскольку мешок «набора с мочеприемником» Актрин Глис Сет имеет антирефлюксный клапан, препятствующий обратному току мочи. Этого не произойдет, даже если Вы перевернете его.

ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ ЕЖЕДНЕВНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЪЕМ ВЫДЕЛЕННОЙ МОЧИ (ДИУРЕЗ). ЭТО НЕУДОБНО, ПОСКОЛЬКУ ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕД СЛИВОМ МОЧИ В УНИТАЗ ПЕРЕЛИВАТЬ ЕЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРНЫЕ ЕМКОСТИ



Действительно, необходимо контролировать свой диурез. Если Вы используете наборы Актрин Глис Сет, измерение диуреза не будет вызывать неудобств, поскольку на мешке есть легко визуализируемая мерная шкала.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ КАТЕТЕРОВ «АКТРИН ЛАЙТ» И НАБОРОВ «АКТРИН ГЛИС СЕТ»?

Хранить катетеры Актрин Лайт и наборы Актрин Глис Сет необходимо при комнатной температуре и в горизонтальном положении для более равномерного распределения гидрофильного лубриканта. Если катетеры находились в вертикальном положении — ничего страшного: придайте катетеру горизонтальное положение на 1–2 минуты, и лубрикант равномерно распределится по всей длине катетера.

КАКОЙ ЛУБРИКАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАТЕТЕРАХ АКТРИН?

В катетерах Актрин используется гидрофильный лубрикант на основе глицерина и воды. Особое соотношение ингредиентов создает лучший скользящий эффект при катетеризации, снижая трение и исключая «залипание» катетера, как это часто случается с другими типами лубрикантов. Поэтому катетер Актрин не травмирует уретру.

КАКОЙ АНТИСЕПТИК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ПЕРЕД КАТЕТЕРИЗАЦИЕЙ?

Мы рекомендуем использовать специальный кожный антисептик «Софта-Ман изо», обладающий широким антимикробным действием и имеющий пролонгированный эффект в течении 3 часов.

КАКОЙ АНТИСЕПТИК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПЕРЕД КАТЕТЕРИЗАЦИЕЙ?

Раствор Пронтосана, воздействуя на патогенные микроорганизмы, предотвращает развитие бактериальной пленки. Также он обладает пролонгированным действием и абсорбирует запахи. Не вызывает раздражения.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ ЛУБРИЦИРОВАННЫЕ КАТЕТЕРЫ?

Сегодня в Российской Федерации лица, имеющие инвалидность, наделены правом на бесплатное получение технических средств реабилитации (ТСР). Необходимость этих средств определяет комиссия врачей медико-социальной экспертизы (МСЭ), составляя индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) согласно нормативным документам — приказам Министерства труда и социальной защиты РФ.

Согласно этим приказам, Вы имеете право на получение до 6 шт. лубрицированных катетеров для самокатетеризации в сутки или наборов-мочеприемников для самокатетеризации по 6 шт. в сутки.

Согласно составленной ИПРА, региональные отделения Фонда социального страхования РФ или региональные министерства социальной защиты производят закупку ТСР и их выдачу нуждающимся лицам.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

1. Необходимо, чтобы в заключении врача — уролога или невролога, который консультировал Вас в поликлинике — или в выписном эпикризе из стационара была написана следующая фраза:

«рекомендована периодическая самокатетеризация лубрицированными катетерами 12 СН 6 раз в сутки»

или «рекомендована периодическая самокатетеризация наборами-мочеприемниками 10 СН 6 раз в сутки».

2. Далее Вам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, пройти там клинично-экспертную комиссию (КЭК) и, получив форму 088У — направление на МСЭ — с вписанными в нее рекомендациями, обратиться в учреждение МСЭ, где Вам разработают индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА), предусматривающую получение лубрицированных катетеров для самокатетеризации.
3. С ИПРА нужно обратиться в территориальный Фонд социального страхования, осуществляющий выдачу технических средств реабилитации.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ МНЕ РАЗМЕР КАТЕТЕРА?

Самым распространенным размером наружного диаметра катетера для периодической катетеризации у мужчин является 12–14 СН (4–4,7 мм соответственно), у женщин 10–12 СН (3,3–4 мм соответственно), у детей 6–10 СН.

Ваш лечащий врач поможет Вам подобрать катетер необходимого диаметра.

Больше информации о диагностике и лечении нейрогенных расстройств мочеиспускания Вы можете найти на сайте «Лиги нейрогенного мочевого пузыря», а также получить онлайн-консультацию у врача-уролога:

www.neurourologist.com

В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ

МУЖСКОЙ НАРУЖНЫЙ КАТЕТЕР УРИМЕД ВИЖН

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ

Мужское недержание мочи является проблемой, которая затрагивает миллионы людей в мире. Недержание мочи может варьироваться от легких до тяжелых форм, когда моча совсем не удерживается в мочевом пузыре.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ НАРУЖНЫЙ КАТЕТЕР УРИМЕД ВИЖН СТАНДАРТ

- Является удобным и надежным средством реабилитации при недержании мочи. Используется в комплекте с ножными и прикроватными мочеприемниками. Обеспечивает пациенту чувство независимости и свободу действий
- Изготовлен из силикона — материала, не вызывающего аллергических реакций
- На внутреннюю поверхность нанесен специальный адгезив, способствующий более надежной фиксации и защите от подтеканий. Он легко применяется и удаляется благодаря адгезиву, который надежно фиксируется на коже
- Большой диапазон размеров от 25 до 41 мм (25, 29, 32, 36, 41 мм) позволяет подобрать физиологичный размер

КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР НАРУЖНОГО КАТЕТЕРА?

Для правильного определения размера изделия рекомендуем провести следующие измерения: с помощью нитки измерить окружность пениса в мм (в незрегированном состоянии), затем полученный результат разделить на 3,14.

НАПРИМЕР:

Окружность пениса равна 75 мм.
 $75 : 3,14 = 24$ мм.

В данном случае лучше подойдет
Уримед Вижн Стандарт 25 мм.



- 5 различных диаметров и 2 различных длины
- Стандартная версия для большинства пациентов и специальные размеры для подростков

Информация для заказа



Уримед Вижн Стандарт (в упаковке 30 шт.)

РАЗМЕР	25 мм	29 мм	32 мм	36 мм	41 мм
Артикул	ИН2525	ИН2529	ИН2532	ИН2536	ИН2541




Уримед Вижн Шот (в упаковке 30 шт.)

РАЗМЕР	25 мм	29 мм	32 мм	36 мм	41 мм
Артикул	Н4525	ИН4529	ИН4532	ИН4536	ИН4541

Уримед Вижн можно использовать в течение **24 часов!**



КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕТЬ И СНЯТЬ УРИМЕД ВИЖН

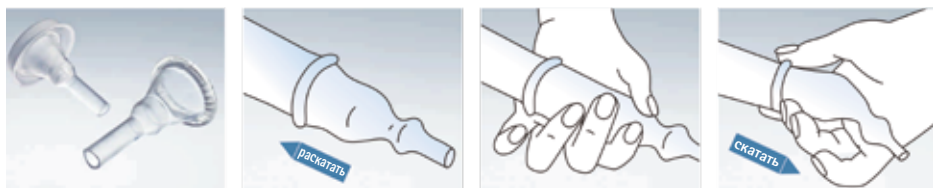

После удаления перед заменой изделия необходимо влажной салфеткой обработать кожу пениса для того, чтобы удалить адгезив, который был нанесен на внутреннюю сторону Уримед Вижн, протереть кожу пениса насухо и надеть новое изделие.

Также рекомендуем остричь или выбрить паховую область перед началом использования Уримед Вижн.

МЕШОК ДЛЯ СБОРА МОЧИ УРИМЕД БЭГ

Чтобы проблема подтекания мочи была незаметной, мы рекомендуем к к изделию Уримед Вижн присоединять мешок для сбора мочи **Уримед Бэг плюс** емкостью 500 или 800 мл.



Информация для заказа

Артикул	28501
Шт. в упаковке	30

Уримед Бэг Плюс 500 мл

- однокамерный
- нестерильный
- с длиной дренажной трубки 60 см

Уримед Трибэг Плюс 800 мл

- трехкамерный
- стерильный и нестерильный
- с длиной дренажной трубки 60 см



Информация для заказа

	Стерильный	Нестерильный
Артикул	28305	28306
Шт. в упаковке	10	10



Сливной клапан при необходимости легко открывается одной рукой. Конструкция дренажной трубки препятствует ее скручиванию, имеет увеличенный диаметр.

Мягкая нетканая подложка препятствует раздражению кожи и обеспечивает для Вас максимальный комфорт.

ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ МОЧЕПРИЕМНИКИ УРИМЕД

Если использование **Уримед Вижн** связано с уходом за лежачим больным, мы рекомендуем использовать мешки **Уримед Бэг** емкостью 1,5 и 2 литра.

Уримед Бэг Плюс 1,5 л

- однокамерный
- нестерильный
- с длиной дренажной трубки 90 см

Уримед Бэг 2 л

- однокамерный
- нестерильный
- с длиной дренажной трубки 120 см



Информация для заказа

Объем (л)	1,5	2
Артикул	28150	28300
Шт. в упаковке	30	30

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЧЕПРИЕМНИКОВ УРИМЕД

Уримед Вижн легко и удобно присоединяются к ноге (можно и под брюки) с помощью мягких и эластичных ремешков **Уримед Стрэйп**.

На поверхность ремешков нанесен силикон, который будет препятствовать смещению мешка на ремешке. Пара ремешков Уримед Стрэйп продевается через специальные отверстия мешка для сбора мочи сверху и снизу.

Уримед Стрэйп

- адаптирован для ножных мешков

Информация для заказа

Артикул	68550
Шт. в упаковке	1 пара



Уримед Хендл

Мешок Уримед Бэг 1, 5 и 2 литра Вы легко закрепите на кровати с помощью специальных креплений **Уримед Хендл**.

Информация для заказа

Артикул	68548
Шт. в упаковке	1



Если Вы используете наружный катетер **Уримед Вижн** и мешки для сбора мочи **Уримед Бэг**, Вы всегда можете быть уверены, что окружающие не заметят Вашей проблемы.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

BMR-C-700244

ООО «Б. Браун Медикал» | www.bbraun.ru

196128, Санкт-Петербург, а/я 34


E-mail: office.spb.ru@bbraun.com

Тел.: +7 (812) 320 4004, факс: +7 (812) 320 5071

117246, Москва, Научный проезд, д. 17

Тел.: +7 (495) 777 1272, факс: +7 (495) 745 7232

 www.vk.com/bbraunrussia  www.fb.com/bbraunrussia

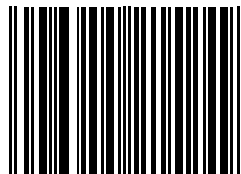

4 046955 215249